

구급장비 관리카드

				관리번호	I-호흡-1
장비명	백벨브마스크 (성인/소아 겸용)	단위	세트	형식(모델)	AMBU Mark IV
		보유수량	2세트	내용연수	2년
배정일	2018.07.26	사용부서	역삼 119안전센터	제작사	AMBU Ltd.



■ 주요제원

- ◇ 용도 : 호흡장애가 있거나 멎은 환자에게 수동으로 호흡을 유지 해주는 장비이다.
- ◇ 규격 :
- ◇ 동력원 :
- ◇ 주요구성품 : 백(백규격 : 성인1600ml), 밸브, 마스크

■ 사용법 및 관리요령

1. 적절한 규격을 선택하여 백-밸브-마스크를 결합한다.
2. 마스크를 환자의 입주위에 밀착시킨다. 이때 마스크가 환자의 입과 코를 덮어 새지 않도록 한다.
3. 규정된 절차와 방법에 따라 환자의 기도를 확보한 후 백을 눌러 환자에게 공기를 주입한다.
4. 사용 후 환자 접촉 부품에 대해 적절한 소독을 실시한다.

구급장비 관리카드

				관리번호	I-호흡-1
장비명	백밸브마스크 (영아용)	단위	세트	형식(모델)	AMBU Mark IV
		보유수량	2세트	내용연수	2년
배정일	2018.07.26	사용부서	역삼 119안전센터	제작사	AMBU ltd.



■ 주요제원

- ◇ 용도 : 호흡장애가 있거나 멎은 환자에게 수동으로 호흡을 유지 해주는 장비이다.
- ◇ 규격 :
- ◇ 동력원 :
- ◇ 주요구성품 : 튜브(해당모델 영아용 리저브백 미포함), 밸브, 마스크

■ 사용법 및 관리요령

1. 적절한 규격을 선택하여 백-밸브-마스크를 결합한다.
2. 마스크를 환자의 입주위에 밀착시킨다. 이때 마스크가 환자의 입과 코를 덮어 새지 않도록 한다.
3. 규정된 절차와 방법에 따라 환자의 기도를 확보한 후 백을 눌러 환자에게 공기를 주입한다.
4. 사용 후 환자 접촉 부품에 대해 적절한 소독을 실시한다.

구급장비 관리카드

				관리번호	I-외상-7
장비명	골반고정밴드	단위	개	형식(모델)	
		보유수량	1개	내용연수	3년
배정일	2018.07.26	사용부서	역삼 119안전센터	제작사	



■ 주요제원

- ◇ 용도 : 사고현장에서 골반 골절을 빠른 시간 내에 안정화시켜 골반골의 고정과 골반내 출혈을 지혈시키는 장비
- ◇ 규격 :
- ◇ 동력원 :
- ◇ 주요구성품 : 본체 1개, 휴대용 가방 1개.

■ 사용법 및 관리요령

1. 골반 손상이 확인이 된 환자의 환부에 밴드를 적용한다.
2. 커프를 이용해 압박을 실시한다.
3. 압력계를 관찰하며 적정 압력을 가한다.

구급장비 관리카드

				관리번호	I-외상-2
장비명	머리고정대 (긴척추고정판 내)	단위	세트	형식(모델)	
		보유수량	1세트	내용연수	5년
배정일	2018.07.26	사용부서	역삼 119안전센터	제작사	국내



■ 주요제원

- ◇ 용도 : 경추 및 척추손상이 의심되는 외상환자의 두부를 고정시키는 장비
- ◇ 규격 :
- ◇ 동력원 :
- ◇ 주요구성품 : 본체 1개, 이마고정끈 1개, 턱고정끈 1개

■ 사용법 및 관리요령

척추고정판에 부착하여 사용하며 두 개의 머리지지대와 받침대, 이마고정끈, 턱고정끈으로 구성
혈액이나 이물질에 스며들지 않는 재질로 착용한 상태에서 MRI, CT, Xray 촬영가능

