

# 보호구 착용 및 제거방법

## ○ 보호구 착용 및 제거순서



## ○ 비닐앞치마 착용 및 제거순서

① 손을 비닐가운 안쪽에 끼운다.	② 가운을 털어 펼친다.	③ 팔을 끼워 손목부위 구멍에 엄지손가락을 끼워 고정한다.	④ 가운 구멍에 목을 통과시켜착용한다.	⑤ 허리 부분은 끈을 매워 고정한다.
⑥ 허리 부분의 끈을 잡아당겨 풀다.	⑦ 앞치마의 목뒤 부분의 절취선을 잡아 당겨 찢어서 벗는다.	⑧ 앞치마의 바깥쪽 부분이 닿지 않도록 뒤집어 손목부위 부터 벗는다.	⑨ 뒤집은 채로 돌돌 말아 폐기물전용 용기에 버린다.	⑩ 손위생을 실시 한다.