


관리번호		I - A - 4		
장 비 명		전문기도유지장비 (I-GEL)	기준수량	1세트
			보유수량	4-1/5-1
구 성 품		내용년수	소모품	
배정 일자	본부구매		운영부서	역삼119안전센터
	자체구매	2018.3.6	용 도	후두경 없이 기도확보
사 진				
제 원	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 용도 : 후두경을 사용하지 않고 응급환자에게 비침습적으로 기도를 확보하는 기구</li> <li>○ 주요구성품 : I-GEL크기별 세트구성, 윤활유(젤리), 보관용 가방</li> </ul>			
사 용 방 법	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 커프의 뒤면에 윤활용 젤리를 바른다.</li> <li>2. I-GEL 튜브를 연필 잡듯이 잡고 커프의 끝을 입천정에 밀착하고 문지르면서 미끄러지듯이 삽입한다.</li> <li>3. 튜브를 구브리면서 입 천정에 밀착된 채로 저항이 느껴질 때까지 충분히 삽입한다.</li> <li>4. BITE BLOCK(개구기)을 물린 후 후두마스크 튜브를 환자의 얼굴 중앙에 위치하도록 고정한다.</li> </ol>			

관리번호		I - A - 2		
장 비 명		비인두기도기		
				기준수량
		보유수량		
구 성 품		6종 1세트	내용년수	소모품
배정 일자	본부구매		운용부서	역삼119안전센터
	자체구매	2018.3.6	용 도	의식있는환자의 기도확보

사  
진



제원

○ 규격 : 6종 1세트

사용  
방법

1. 적절한 크기를 선정
2. 삽입부위에 윤활제를 바른다
3. 비스듬한 경사면이 중앙부위를 향하도록 삽입
4. 손상이 가지않도록 천천히 삽입하여 고정

관리번호		I-E-1-1		
장비명		경추보호대 (조절식 소아용)	기준수량	3세트 이상
			보유수량	3세트
구성품		단일 제품	내용년수	소모품
배정 일자	본부구매		운영부서	역삼119안전센터
	자체구매	2018.3.6	용도	경추 고정

사진



제원

- 용도 : 목 부위(경추)에 발생한 골절 및 이완 등을 보호하기 위해 사용하는 고정장치
- 규격 : 환자의 크기에 따라 조절가능한 경추 부목(성인용 및 소아용)

사용  
방법

1. 환자의 목 선에 손가락을 갖다 대어 환자 목 길이를 측정한다
2. 측정된 크기에 따라 부목 크기를 조절한다.
3. 부목을 둥글게 감듯이 결속한다
4. 환자의 목 주위로 부목을 넣어 결합한다. 이때 부목이 느슨해 지지 않도록 한다
5. 환자의 운송 및 조치가 끝난 후 부목을 해체한다.

관리번호		II-A-3	
장비명		주사바늘폐기용기	
구성품		단일 제품	
구 성 품		내용년수	소모품
배정 일자	본부구매	운용부서	역삼119안전센터
	자체구매	2018.3.6	용 도

사  
진



제  
원

- 사용을 하였거나 노출된 주사바늘을 따로 분리하여 폐기하는 플라스틱 박스로 폐기용기에 투입후 쉽게 개봉되지 않는 구조

사  
용  
방  
법

- 사용한 주사바늘을 용기뚜껑을 열고 그대로 투입한다.
- 주사바늘 커버를 다시 끼워서 버리려고 하지않는다.  
(주사바늘에 상처 입을 위험이 있음)